


combi[®] Haler-solo

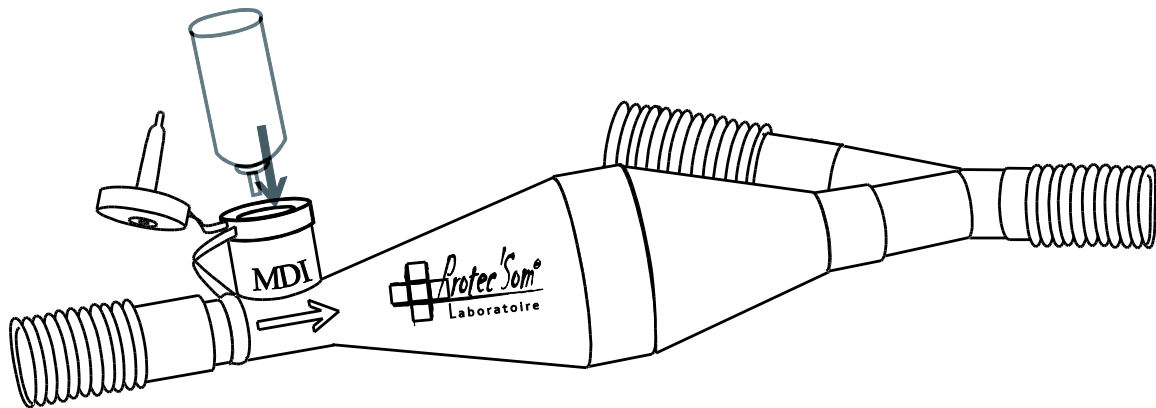


Notice d'utilisation

Notice d'utilisation de Combi-Haler Solo® pour patients sous ventilation mécanique.

- 1) **Descriptif** : Combi-Haler Solo® est une chambre d'inhalation destinée aux circuits de ventilation mécanique invasifs et non invasifs. Elle permet l'utilisation d'un aérosol doseur pressurisé. Elle est composée de:

- a. Une entrée
- b. Une sortie
- c. Une ouverture pour aérosol-doseur
- d. Bouchon étanche

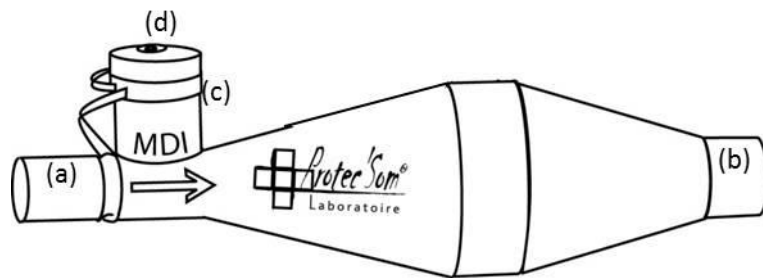

2) Précautions particulières :


- a. Combi-Haler Solo® est livré assemblé. Il ne doit en aucun cas être ouvert avant utilisation. Tout Combi-Haler Solo® ayant été ouvert doit être jeté et remplacé.
- b. Lors de la mise en service, il y a lieu de s'assurer que :
 - i. Le dispositif ne contient aucun corps étranger.
 - ii. Le bouchon est correctement positionné lorsqu'aucun aérosol-doseur n'est utilisé.
 - iii. La buse d'aérosol-doseur assure correctement sa fonction (tester visuellement avec une bouffée de produit.)
- c. Pendant l'utilisation, il y a lieu de s'assurer que :
 - i. Le bouchon est correctement positionné lorsqu'aucun aérosol-doseur est utilisé.
 - ii. La buse d'aérosol-doseur assure correctement sa fonction (vérification visuelle lors de chaque libération de bouffée de produit.)

3) Durée d'utilisation :


- a. Combi-Haler Solo® est un dispositif non stérilisable pour patient unique.
- b. Combi-Haler Solo® peut être utilisé pendant la durée d'utilisation du circuit de ventilation sans excéder trente jours consécutifs.

- c. Combi-Haler Solo® ne doit en aucun cas être utilisé sur plus d'un circuit et doit être détruit dans les mêmes conditions que le circuit sur lequel il a été monté.
- d. Tout remplacement total ou partiel du circuit doit entraîner le remplacement de Combi-Haler Solo®.

4) Montage sur le circuit et utilisation :

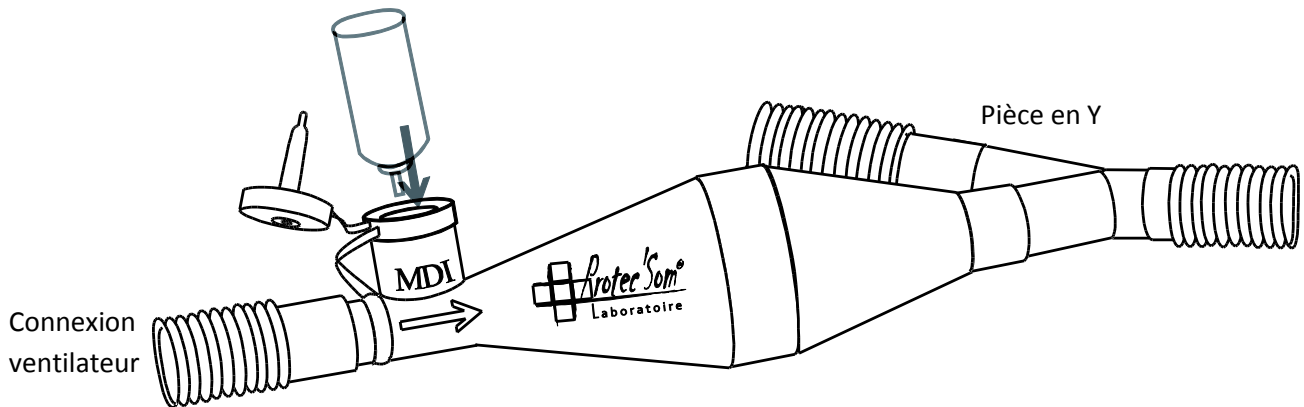

- a. Insérer le dispositif Combi-Haler Solo® dans le circuit de ventilation mécanique entre la branche inspiratoire et la pièce en Y en respectant le sens de la flèche comme indiqué sur le dispositif Combi-Haler-Solo®. Aucun filtre ne doit être interposé entre Combi-Haler Solo® et le patient.
L'extrémité de la cartouche de l'aérosol-doseur se fixe sur l'orifice annoté MDI. Pour le bon fonctionnement de l'aérosol-doseur, se référer aux indications du fabricant.
- b. Utilisation d'un aérosol-doseur avec Combi-Haler Solo® :

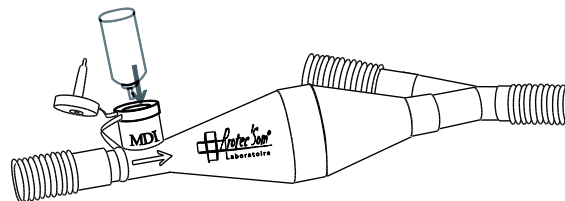

- i. Agiter la cartouche de l'aérosol-doseur suivant les instructions de son fabricant.
 - ii. Ouvrir le bouchon de l'orifice annoté MDI et insérer la tige de la cartouche de l'aérosol-doseur.
 - iii. Actionner la cartouche de l'aérosol-doseur dès le début du cycle respiratoire.
 - iv. Laisser l'inspiration provenant du ventilateur administrer la dose médicamenteuse au patient. Retirer la cartouche de l'aérosol-doseur et remettre le bouchon d'orifice en place.
 - v. Répéter les étapes iii à v selon le nombre de doses nécessaire.
- c. Combi-Haler Solo® peut être utilisé avec un aérosol-doseur.

Combi-Haler Solo® est fabriqué en France par :

Laboratoire ProtecSom SAS, ZA d'Armanville, 50700 Valognes

Tél : +33 (0) 233 887 094 / Fax : +33 (0) 233 887 095

@ : info@laboprotecsom.com

<http://www.laboprotecsom.com>

La marque de commerce Combi-Haler Solo® est une marque de Laboratoire ProtecSom SAS.

Les brevets ont été déposés conjointement par l'Université de Tours, l'INSERM et le Laboratoire ProtecSom.



Date de révision de la notice : octobre 2014 / N° de révision : 20131004

