



Notice d'utilisation

Chère patiente, cher patient,

Vous venez de recevoir vos housses anti-acariens ProtecSom® et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Destinées aux patients allergiques aux acariens, vos housses sont des véritables dispositifs médicaux de haute technologie développées par ProtecSom®. Fabriquées sous processus certifiés ISO 13485:2003 (norme de fabrication des dispositifs médicaux), leurs qualités de filtration en font de véritables barrières infranchissables entre vous et les allergènes d'acariens.

La qualité et le confort de vos housses ProtecSom® vous apporteront toute satisfaction pendant de nombreuses années. Pour que votre housse conserve toute son efficacité, lisez attentivement les conseils qui suivent.

Chaleureusement,

Alexis Porée

Directeur Général

Votre médecin vous a diagnostiqué une allergie aux acariens

Votre housse anti-acariens fait partie des mesures indispensables à mettre en place pour en diminuer les symptômes.



Avant d'ouvrir l'emballage de vos housses...

Assurez-vous de la bonne dimension de chacune des housses que vous avez commandées. Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons remettre dans nos stocks une housse dont l'emballage a été ouvert.

Vous avez opté pour l'une des gammes suivantes :

- La dimension initiale de votre housse tient compte du futur rétrécissement lors des premiers lavages. Votre housse est donc plus grande que ce que vous avez commandé et aura sa taille normale après quelques lavages.
- La dimension ainsi que l'aspect de votre housse ne changeront pas au fil des lavages.
- L'aspect un peu raide de votre housse disparaîtra dès le premier lavage pour laisser place à un textile particulièrement doux et agréable.
- La dimension initiale de votre housse tient compte du faible rétrécissement lors des premiers lavages. Votre housse est donc légèrement plus grande que ce que vous avez commandé et aura sa taille normale après quelques lavages.

texaal®
Coton

texaal®
Polyester

noxaalon®

noxaalon®
Bamboo

Nos conseils avant l'installation

- Pour votre confort, un **premier lavage avant utilisation** rendra à vos housses toute leur souplesse.
- **Aérez et aspirez consciencieusement le matelas sur les deux faces.** Si vous n'êtes pas équipés de housses anti-acariens pour couettes et oreillers, lavez ces derniers une fois par mois à 60°C.



Pourquoi une seule ouverture sur ma housse ?

Véritable gage d'efficacité, les ouvertures de votre housse anti-acariens sont limitées au minimum car elles sont les principales sources de fuite des allergènes.

L'installation de vos housses

Etape 1



Si possible, **mettez en place votre housse de matelas à l'aide d'une autre personne, cela simplifiera votre installation.** Positionnez-vous de chaque côté du matelas et remontez de façon homogène la housse autour de votre élément de literie.



Si cela n'est pas possible, installez-vous **auprès du matelas et positionnez la housse en « accordéon ».** Faites ensuite progressivement remonter la housse le long du matelas. Pour un confort optimal, nous vous préconisons de placer le zip de votre housse de couette en bas du lit.



Etape 2

Une fois la housse installée, **fermez le zip.** Nous vous conseillons de **positionner votre doigt sous le curseur** pendant la fermeture afin de bien positionner le rabat et l'ouverture du zip pour éviter les incidents.



Etape 3

Une fois vos housses anti-acariens installées, **repositionnez vos housses traditionnelles.**

Si malgré vos précautions le tissu se trouve pincé au point de bloquer le curseur, ne prenez pas le risque de déchirer votre housse. Une astuce consiste à **verser une goutte d'huile de table puis à dégager le tissu en le tirant sur le côté du curseur.**

Dans tous les cas : déchirure, couture défectueuse, curseur bloqué... :


N'hésitez pas à nous appeler au **numéro indiqué au dos.** Nous vous apporterons des **conseils** et vous expliquerons la **procédure à suivre** pour la réparation de votre housse.

L'entretien de vos housses



Vos housses anti-acariens se lavent à **60 degrés** et peuvent passer au sèche-linge. Nous vous conseillons de laver votre **housse de matelas 2 fois par an** et de laver vos **housses de couettes et d'oreillers 1 fois par mois** (minimum entre 6 et 8 fois par an). Pour plus de précisions, reportez-vous à la vignette de composition et à l'emballage de votre housse.

Comment limiter la prolifération des acariens ?

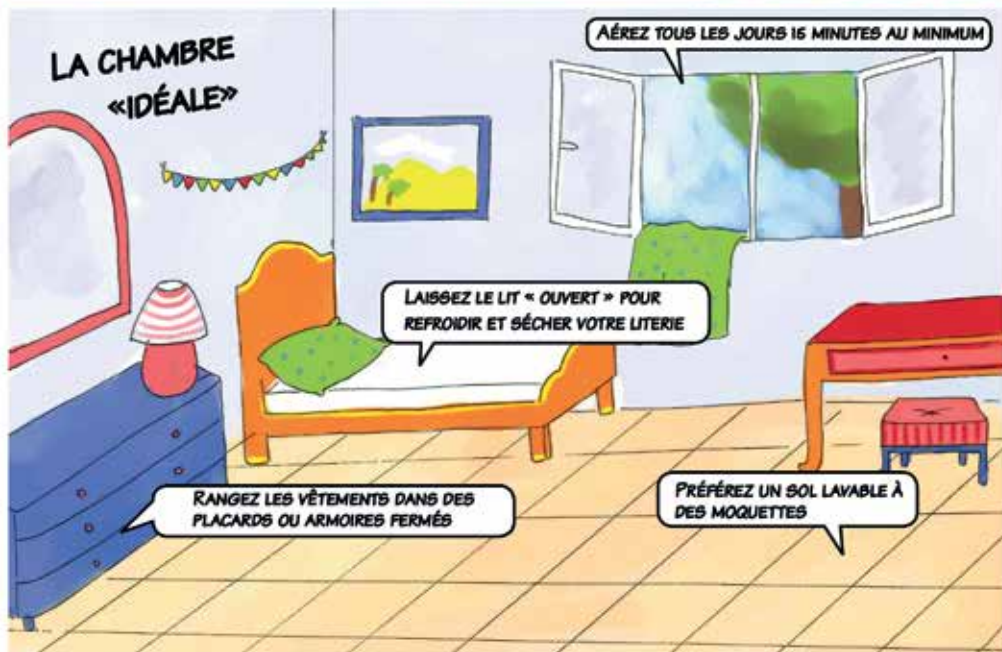

Suivez les actualités de
ProtecSom sur les réseaux
sociaux !



L'équipe ProtecSom est à votre
écoute du lundi au vendredi de
9h à 17h pour répondre à vos
questions :

France : +33 (0) 2 33 88 70 94
Belgique : +32 (0) 78 050 017