


Comment limiter la prolifération des acariens ?

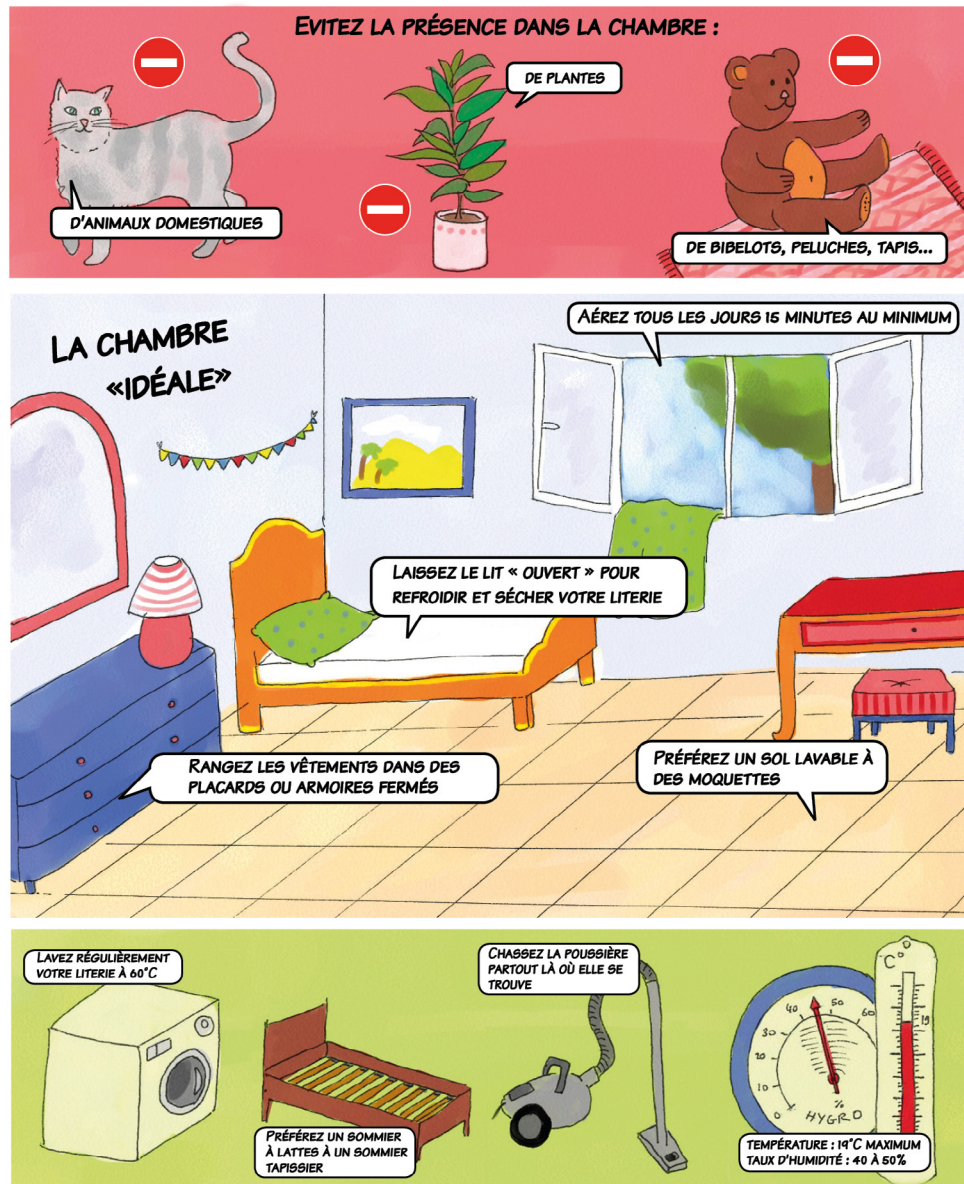

L'ensemble du processus de fabrication et de distribution de ses protections anti-allergènes est certifié ISO 13485:2016 (norme des dispositifs médicaux). Les marques de commerce Texaal® et Noxaalon® sont la propriété d'OptimHal-ProtectSom SAS.

NHAA-003 / 20221212



Notice d'utilisation

Chère patiente, cher patient,

Vous venez de recevoir vos housses anti-acariens ProtectSom® et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Destinées aux patients allergiques aux acariens, vos housses sont des dispositifs médicaux de haute technologie développées par ProtectSom®. Fabriquées sous processus certifiés ISO 13485:2016 (norme de fabrication des dispositifs médicaux), leurs qualités de filtration en font de véritables barrières infranchissables pour les allergènes d'acariens.

La qualité et le confort de vos housses ProtectSom® vous apporteront toute satisfaction pendant de nombreuses années. Pour qu'elles conservent toute leur efficacité, lisez attentivement les conseils qui suivent.

Chaleureusement,

Alexis Porée
Directeur Général

Suivez les actualités de ProtectSom sur les réseaux sociaux !



@Protectsom
instagram.com/protectsom



@Laboprotectsom
facebook.com/LaboProtectSom

L'équipe ProtectSom est à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 17h
pour répondre à vos questions :

+33 (0)2 33 88 70 94
sav@ohps-lab.com



Partenaire : Asthme & Allergies

www.protectsom.com

*Votre médecin vous a diagnostiqué une allergie aux acariens ?
Votre housse anti-acariens fait partie des mesures indispensables à mettre en place pour en diminuer les symptômes.*



Avant d'ouvrir l'emballage de vos housses...

Assurez-vous de la bonne dimension de chacune des housses que vous avez commandées. Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons remettre dans nos stocks une housse dont l'emballage a été ouvert.

Des housses anti-acariens adaptées

Pour faciliter la mise en place de votre housse de matelas et assurer son efficacité de filtration, une marge de sécurité de 2 cm a été ajoutée en longueur et largeur.

Pour anticiper les futurs rétrécissements des textiles naturels tel que **Texaal® Coton**, une marge de 1,5 à 6% selon le textile est ajoutée lors de la fabrication. Les housses anti-acariens **Texaal® Coton** sont donc plus grandes que la taille commandée et elles obtiendront leur taille définitive après plusieurs lavages.

Nos conseils avant l'installation

- ➔ Pour votre confort, **un premier lavage avant l'utilisation** apportera à vos housses plus de douceur et de souplesse.
- ➔ **Aspirez consciencieusement votre matelas sur toutes ses faces**, si possible avec un aspirateur à filtre HEPA. **Renouvelez l'opération** pour les couettes et oreillers, ou si possible, lavez-les en machine.



Pour limiter le développement des acariens dans la chambre, la mise en place d'une housse anti-acariens doit être accompagnée de mesures complémentaires :

- ➔ **Maintenez une température maximum de 19°C.**
- ➔ **Maintenez l'atmosphère** de la pièce en dessous de 50 % d'humidité.
- ➔ Lors de la mise en place de vos housses anti-acariens, **nous vous conseillons de porter un masque de protection anti-acariens ProtecSom®**, disponible sur notre boutique en ligne.
- ➔ Supprimez tous les objets susceptibles de conserver de la poussière (bibelots, peluches, etc...).

***Petite astuce !** Pour éliminer les particules d'acariens dans vos peluches, mettez-les 48 h au congélateur dans un sac hermétique, puis aspirez-les consciencieusement avec un aspirateur à filtre HEPA.*

L'installation de votre housse de matelas

Si possible, mettez en place votre housse anti-acariens pour matelas à l'aide d'une autre personne, cela en simplifiera l'installation. Positionnez-vous de chaque côté du matelas et remontez de façon homogène la housse autour de votre élément de literie.

Si vous êtes seul(e) pour la mise en place, positionnez-vous près du matelas et installez la housse en « accordéon ». Faites ensuite progressivement remonter la housse le long du matelas.

Positionnez le rabat sous le zip puis fermez votre housse anti-acariens.

Par dessus votre housse anti-acariens, installez votre alèse (si vous en avez une) puis votre drap-housse classique.

Etape 1



Etape 2



Etape 3



L'installation de votre housse de couette et housse d'oreiller

Insérez chaque élément dans sa housse puis étalez le rabat sous le zip et fermez votre housse grâce à la fermeture à glissière. Une fois vos housses anti-acariens installées, repositionnez vos housses traditionnelles par-dessus.

⚠ Si par mégarde, le tissu se trouve pincé au point de bloquer le curseur, ne prenez pas le risque de déchirer votre housse. Une astuce consiste à **verser une goutte d'huile de cuisine puis à dégager le tissu en le tirant sur le côté du curseur.**

L'entretien de vos housses

Vos housses anti-acariens se lavent à **60°C** et peuvent passer au sèche-linge. Nous vous conseillons de laver votre **housse de matelas 2 fois par an** et de laver vos **housses de couettes et d'oreillers 1 fois par mois** (minimum entre 6 et 8 fois par an). Pour plus de précisions, reportez-vous à la vignette de composition et à l'emballage de votre housse.

Votre housse est déchirée ? Rassurez-vous, celle-ci est garantie !

*Pour la réparation ou le remplacement de votre housse, nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter des conseils au **02.33.88.70.94** ou par courrier électronique à l'adresse : **sav@ohps-lab.com***