



Notice d'utilisation

Cher·e·s patient·e·s,

Vous venez de recevoir vos housses anti-acariens ProtecSom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Destinées aux patients allergiques aux acariens, vos housses sont des dispositifs médicaux de haute technologie développées par ProtecSom. Fabriquées sous processus certifiés ISO 13485:2016 (norme de fabrication des dispositifs médicaux), leurs qualités de filtration en font de véritables barrières infranchissables pour les allergènes d'acariens.

La qualité et le confort de vos housses ProtecSom vous apporteront toute satisfaction pendant de nombreuses années. Pour garantir une bonne durabilité, lisez attentivement les conseils qui suivent.

En vous souhaitant de douces nuits,

L'équipe ProtecSom



Partenaire :

Asthme & Allergies
ASSOCIATION

Avant d'ouvrir l'emballage de vos housses...

Assurez-vous de la bonne dimension de chacune des housses que vous avez commandées. Pour des questions d'hygiène, nous ne pouvons remettre dans nos stocks une housse dont l'emballage a été ouvert.

L'installation de votre housse d'oreiller, de couette et de matelas

Nos 3 conseils avant l'installation



Pour votre confort, **un premier lavage avant l'utilisation** apportera à vos housses plus de douceur et de souplesse.



Si possible, lavez à 60°C vos oreillers et votre couette. Si cela n'est pas possible, **secouez-les à l'extérieur et aspirez-les** de préférence avec un aspirateur à filtre HEPA



Si votre matelas est déjà en service, aspirez-le consciemment sur les deux faces afin de limiter les allergènes qu'il contient, si possible avec un aspirateur à filtre HEPA.


L'installation de votre housse

Oreiller / couette

Insérez chaque élément dans sa housse anti-acariens puis étalez le rabat de textile à l'intérieur de votre housse sous la fermeture. Ce rabat empêche les fuites d'allergènes par la fermeture. **Fermez votre housse grâce à la fermeture à glissière.** Ré-installer vos housses d'oreiller et de couette traditionnelles par-dessus.

Matelas

Étape n°1 : Si possible, **installez votre housse anti-acariens pour matelas à l'aide d'une autre personne,** cela en simplifiera sa mise en place. **Positionnez-vous de chaque côté du matelas et remontez de façon homogène la housse autour de votre élément de literie.** Si vous êtes seul-e pour la mise en place, positionnez-vous près du matelas et installez la housse en « accordéon ». Faites ensuite progressivement remonter la housse le long du matelas.

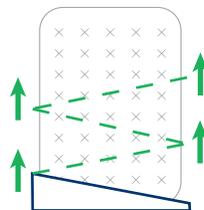

Étape n°2 : Positionnez le rabat sous la fermeture puis fermez votre housse anti-acariens.

Étape n°3 : Par-dessus votre housse anti-acariens, installez votre alèse (si vous en utilisez une) puis votre drap-housse.



Si par mégarde le tissu se trouve pincé au point de bloquer le curseur, ne prenez pas le risque de déchirer votre housse. **Une astuce consiste à verser une goutte d'huile de cuisine puis à dégager le tissu en le tirant sur le côté du curseur.**

Les marges de sécurité

Pour faciliter la mise en place de votre housse de matelas et assurer son efficacité de filtration, une marge de sécurité de quelques centimètres a été ajoutée en longueur et largeur.

Info Texaal® Coton : Pour anticiper le rétrécissement naturel du coton, une marge supplémentaire est intégrée aux housses anti-acariens Texaal® Coton (1.5% à 6% selon le lot de textile). Ces housses seront donc plus grandes que la taille commandée. Elles obtiendront leur taille définitive après plusieurs lavages.

L'entretien de vos housses

Vos housses ProtecSom se **lavent à 60°C**, avec votre lessive habituelle et **peuvent être mises au sèche-linge**. N'ajoutez **pas d'adoucissant** et **ne repassez pas vos housses**. Il est fortement **déconseillé d'utiliser de la javel ou tout type de produit autre que de la lessive**.

Conseil de fréquence de lavage :

- Housse de matelas, 2 fois par an.
- Housse de couette, 1 fois par mois.
- Housse d'oreiller, 1 fois par mois.

Pour la gamme Noxaalon®, lavez vos housses avec les fermetures fermées.

Pour la gamme Texaal® Coton et Texaal® Polyester, lavez vos housses avec les fermetures ouvertes.

L'équipe ProtecSom vous conseille

Nous sommes disponibles **du lundi au vendredi de 9h à 17h**.

Contactez-nous au :

***33 (0)2-33-88-70-94**

Ou par e-mail à l'adresse :

services.clients@protecsom.com



Votre housse est déchirée ? Rassurez-vous, elle est garantie !

*Pour la réparation ou le remplacement de votre housse, nous sommes à votre entière disposition au : **+33 (0)2-33-88-70-94** ou par e-mail à l'adresse : **sav@protecsom.com***

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :



@protecsom

[instagram.com/protecsom](https://www.instagram.com/protecsom)



@LaboProtecSom

[facebook.com/LaboProtecSom](https://www.facebook.com/LaboProtecSom)

Comment limiter la prolifération des acariens ?



Évitez la présence d'animaux domestiques dans la chambre



Évitez la présence de plantes dans la chambre



Évitez la présence de peluches, bibelots, tapis dans la chambre



Aérez tous les jours 15 minutes au minimum



Laissez le lit «ouvert» **pour refroidir et sécher la literie**



Préférez un sol lavable à de la moquette



Lavez régulièrement la literie à 60°C



Préférez un sommier à lattes à un sommier tapissier



Chassez la poussière partout où elle se trouve



Surveillez la température et l'hygrométrie : **19°C maximum / 55% maximum**